



# Alert-iT

## Sensor de movimiento

### Manual de usuario

Este documento se aplica a;

Modelo: P210

Versión del producto: v1

Firmware: v1.0

Alert-iT y el logotipo de Alert-iT son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de iTs Designs Ltd.

Derechos de autor © 2025 iTs Designs Ltd. Todos los derechos reservados.

UH1523-SPN P210 Manual de usuario. Versión: 1.0.0 [27 de febrero de 2025]



# Contenido

1	SEGURIDAD .....	4
1.1	Significado símbolos usados en el dispositivo y en la documentación .....	4
1.2	Vida útil del dispositivo .....	4
1.3	Precauciones de seguridad.....	5
1.4	Ajuste no intencionado de la configuración .....	5
2	CONTENIDO DEL PAQUETE.....	6
3	PRODUCTOS COMPATIBLES.....	6
4	INTRODUCCIÓN.....	7
4.1	Descripción del producto .....	7
4.2	Vista general del dispositivo .....	7
5	INSTALACIÓN .....	8
	Montaje en la pared.....	8
6	FUNCIONES BÁSICAS .....	8
6.1	Inserción de baterías .....	8
6.2	Apagado del dispositivo.....	8
6.4	Armado del dispositivo.....	8
6.5	Desarmado del dispositivo .....	9
6.6	Alarmas de movimiento .....	9
6.7	Reseteo de alarmas .....	9
6.8	Mando a distancia (opcional) .....	9
	Batería Baja .....	9
	Batería muy baja .....	9
7	INSERCIÓN DE BATERÍAS Y VIDA ÚTIL DE LAS BATERÍAS .....	10
8	CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO .....	11
	RadioAddress .....	11
	Luz de indicador de estado .....	11
	Fallo Monitor Off.....	11
	Función AlarmTimeout & Fallo AlarmTimeout .....	11
	Función AlarmLatching & ClearDelay.....	11
10	RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE .....	12
11	ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO DESPUÉS DE SU USO .....	12
12	DECLARACIONES DE CONFORMIDAD .....	12
13	CONTROLES RUTINARIOS .....	12
14	DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DE ALERT-IT .....	13
	GARANTÍA .....	13
	TÉRMINOS.....	13
	EXCLUSIONES Y LIMITACIONES.....	14
	DERECHOS LEGALES DEL CONSUMIDOR.....	14
15	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	15
16	BÚSQUEDA DE ALARMAS Y CÓDIGOS DE FALLO .....	15
16.1	Alarmas.....	15

# 1 SEGURIDAD

## 1.1 Significado símbolos usados en el dispositivo y en la documentación



Número de serie.



Referencia



Fabricante



Fecha de fabricación.



Consulte las instrucciones de uso.



Importador.



Marcado CE. El producto cumple la regulación europea relativa al producto



Marca UKCA. El producto cumple la regulación inglesa relativa al producto



Símbolo de la Directiva Europea de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Directiva RAEE) 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

**RoHS**

Indica que el producto cumple con la directiva europea 2002/95/CE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (comúnmente conocida como la Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas o RoHS).

## 1.2 Vida útil del dispositivo

La vida útil esperada del dispositivo en uso doméstico normal es de 5 años.

Reemplace el dispositivo después de esto o antes, si;

1. se indica lo contrario
2. si se observa algún daño en el dispositivo.

Consulte **la página 12** para obtener orientación sobre el reciclaje. Si se observan grietas o daños estructurales, deje de usar y reemplace el dispositivo de inmediato.

**NOTA:** las baterías deben reemplazarse cuando el dispositivo no emite alarma o si la pantalla del receptor indica "BATERÍA BAJA".

### 1.3 Precauciones de seguridad

Este producto Alert-iT ha sido diseñado teniendo en cuenta la fiabilidad y la integridad. Si bien ofrece un método de alerta altamente vigilante, siempre es posible que una condición de socorro pueda pasar desapercibida por una variedad de razones (incluido el mal funcionamiento) y en situaciones que amenazan la vida es aconsejable usar el sistema Alert-iT junto con técnicas adicionales. Ni el fabricante ni su distribuidor pueden aceptar la responsabilidad legal de proporcionar un sistema que sea infalible.

El cuidador es responsable de evaluar los riesgos de usar este equipo y cualquier configuración relacionada con él.

- Este dispositivo está diseñado solo para ser utilizado como ayuda para un cuidador.
- Asegúrese de que cualquier cable de llamada de enfermería (solo con P210B) esté correctamente instalado y asegurado para evitar el riesgo de tropiezos, enredos o estrangulamiento.
- Asegúrese de que las notificaciones de alarma se reciban en el lugar de los cuidadores.
- El cuidador nunca debe activar una alarma sin comprobar el estado del paciente.
- Se debe realizar una evaluación de riesgos para determinar si el nivel de confiabilidad que ofrece el dispositivo es suficiente o si se necesita equipo adicional. Se debe tener en cuenta la probabilidad de que el paciente manipule el sistema y provoque un mal funcionamiento del mismo.
- Limpie y desinfecte cada artículo según sea necesario de acuerdo con la información de la **página 12**.
- Pruebe regularmente el dispositivo como se describe en estas instrucciones de uso. Consulte **la página 12**.
- No utilice este dispositivo para ningún otro propósito que no sea el especificado por el fabricante.
- Algunos accesorios están equipados con pequeños tornillos y tienen bolsas de plástico. Asegúrese de que estos no caigan en posesión de personas vulnerables que puedan atragantarse con ellos.
- No intente reparar el dispositivo usted mismo.
- No se permite el mantenimiento del producto durante su uso.
- Si el equipo se modifica de alguna manera, se deben realizar inspecciones y pruebas adecuadas para garantizar el uso seguro continuo del equipo.
- No instale este dispositivo cerca o encima de otro dispositivo. Sin embargo, si esto no se puede evitar, el usuario debe asegurarse de que el dispositivo funcione de manera normal.
- Retire las baterías cuando el dispositivo no esté en uso o cuando esté almacenado durante un período prolongado.
- Al igual que con todos los equipos electrónicos, existe la posibilidad de que el equipo interfiera o se vea afectado por la interferencia de otros dispositivos eléctricos o electrónicos. Por este motivo, evite colocar el dispositivo, el sensor o los cables de conexión muy cerca de dispositivos electrónicos sensibles o que produzcan campos electromagnéticos fuertes, como transmisores de radio, teléfonos móviles o cables de alimentación.

### 1.4 Ajuste no intencionado de la configuración

- Cambiar la dirección de radio del dispositivo (sin cambiarla también en el equipo receptor) hará que ya no se reciban las notificaciones de alarma resultantes.

## 2 CONTENIDO DEL PAQUETE

Tenga en cuenta: El contenido completo del paquete variará según la configuración exacta del sistema y los accesorios solicitados:

P210:PIR



P211: Mando a distancia

1x **Sensor de movimiento PIR** [P210]

2x **AA1.5V (LR06)Pilas alcalinas** (No instaladas) (No se muestran)

1x **Kit de montaje** [Incluye 2x tornillos, 2x almohadillas adhesivas] (No se muestran)

*Tenga en cuenta: El Mando a distancia es un extra opcional [Referencia P211].*

## 3 PRODUCTOS COMPATIBLES

**Receptores:**

- Receptor Alert-iT [P137/P168]
- Amplificador de señal [P164]

Nota: Para obtener información adicional, póngase en contacto con su proveedor de equipos.

## 4 INTRODUCCIÓN

Estas "instrucciones de uso" describen el uso del Detector de presencia Alert-iT .

Las versiones de producto a las que se aplican estas instrucciones se muestran en la página principal de este documento. Esto debe consultarse y compararse con el número del versión del producto que se muestra en la etiqueta de información del mismo, que se encuentra en la parte superior de su dispositivo. Si este documento no es adecuado para su producto, consulte la sección "soporte" de nuestro sitio web para obtener instrucciones alternativas.

- Siga todas las instrucciones proporcionadas en este documento con respecto a la instalación, el uso, la limpieza y la eliminación del dispositivo.

### 4.1 Descripción del producto

El **Detector de presencia** (en adelante "**dispositivo**") suele ser utilizado por los cuidadores para detectar a una persona que sale de su cama o habitación.

El dispositivo se puede montar en una pared o sobre una puerta utilizando las almohadillas adhesivas o los tornillos provistos.

Alternativamente, el dispositivo se puede colocar al lado o debajo de la cama mirando hacia donde la zona por donde la persona puede levantarse de la cama. Esto activaría el dispositivo en el momento que sus pies cuelguen de la cama.

Los cuidadores son notificados mediante alertas visuales y sonoras (si están habilitadas) y/o una notificación a través de un sistema externo, por ejemplo, un localizador inalámbrico o un sistema de llamadas por cable.

El entorno operativo suele ser un dormitorio en una casa familiar o en un centro residencial.

### 4.2 Vista general del dispositivo



## 5 INSTALACIÓN

Tenga en cuenta: Si no se utiliza un mando a distancia, el dispositivo deberá estar al alcance de la mano para acceder al botón "**Armar / Desarmar**" (por ejemplo, para resetear las alarmas).

### Montaje en la pared

1. Se ha proporcionado un kit de montaje en pared que contiene 2 tornillos y 2 almohadillas adhesivas para fijar el dispositivo a la pared.
2. La placa posterior se puede quitar del dispositivo y fijar en la ubicación requerida.
3. A continuación, el dispositivo se puede enganchar a la placa posterior.
4. Para quitar el dispositivo (por ejemplo, para cambiar las baterías), la lengüeta debajo del dispositivo debe presionarse hacia la pared y el dispositivo se desliza hacia arriba para liberarlo.

## 6 FUNCIONES BÁSICAS

### 6.1 Inserción de baterías

Cuando se insertan las baterías por primera vez, las luces de "**Alarma**" y "**Estado**" se iluminarán alternativamente durante varios segundos mientras se asienta el circuito PIR interno.

Una vez que ambas luces se apagan, el dispositivo está listo para usar.

*Nota: Si el dispositivo se ha apagado previamente o se permite que las baterías se agoten por completo durante un tiempo prolongado, es posible que sea necesario presionar brevemente el botón "**armar / desarmar**" para "despertar" el dispositivo después de que se hayan insertado baterías nuevas.*

### 6.2 Apagado del dispositivo

El dispositivo se puede apagar presionando y manteniendo presionado el botón "**Armar / Desarmar**" durante 8 segundos hasta que se iluminen ambas luces.

Suelte el botón y la luz de "**Alarma**" parpadeará rápidamente mientras el dispositivo se apaga.

- Presione el botón "**Armar / Desarmar**" brevemente para activar el dispositivo.

*Nota 1: El dispositivo transmitirá una fallo "**Monitor Off**" cuando se apague.*

*Nota 2: Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período prolongado (es decir, varios meses o más), se recomienda retirar las baterías antes de almacenarlo para evitar fugas de las baterías.*

### 6.3 Encender el dispositivo

El dispositivo se puede encender presionando brevemente el botón "**Armar / Desarmar**".

### 6.4 Armado del dispositivo

- Mantenga presionado el botón "**Armar / Desarmar**" durante 2 segundos.
- La luz verde de "**Estado**" comenzará a parpadear.
- Después de "15 segundos", el parpadeo se detendrá y el dispositivo ahora estará armado.
- Si el dispositivo ve algún movimiento después de esto, se activará una alarma.

*Nota 1: La luz verde de estado parpadeará cada 6 segundos mientras esté armado.*

*Nota 2: El dispositivo también se puede armar o desarmar usando un mando a distancia(opcional).*

## 6.5 Desarmado del dispositivo

Una vez que el dispositivo ha sido "**Armado**", pero antes de que se active una alarma, puede ser "**Desarmado**" por el cuidador.

- Mantenga presionado el botón "**Armar / Desarmar**" durante 2 segundos. Ambas luces se iluminarán brevemente
- El dispositivo ahora está desarmado.

*Nota: Esto es más práctico cuando se usa el llavero, ya que el dispositivo se puede desarmar a distancia al entrar a la habitación.*

## 6.6 Alarmas de movimiento

El sensor PIR tiene una ventana de detección de aproximadamente **105º** horizontal por **45º** vertical.

Los movimientos dentro de una distancia de hasta **4 metros** de esta ventana activarán una alarma.

Cuando se haya activado una alarma, la luz roja de "**Alarma**" comenzará a parpadear y se notificará al cuidador a través del receptor inalámbrico de Alert-iT o a través de la salida cableada al sistema de llamada de enfermería.

## 6.7 Reseteo de alarmas

- Una vez activada una alarma, mantenga presionado el botón "**Armar / Desarmar**" durante 2 segundos.
- El dispositivo emitirá un pitido de dos tonos y ambas luces se iluminarán brevemente.
- La señal de reseteo se enviará a cualquier receptor inalámbrico.

*Nota: La alarma también se puede restablecer usando el botón "**OFF / Desarmado**" en el mando a distancia opcional.*

## 6.8 Mando a distancia (opcional)

Para armar el dispositivo, mantenga presionado el botón "**ON / Armar**" durante varios segundos hasta que la luz de "**Estado**" del dispositivo comience a parpadear en verde.

Para desarmar o restablecer el dispositivo, mantenga presionado el botón "**Off / Desarmado**" durante varios segundos hasta que ambas luces se iluminen brevemente.

## 6.9 Monitoreo de batería

El dispositivo comprueba el estado de la batería cada 5 minutos.

### Batería Baja

Cuando el dispositivo detecta que la batería está baja, se transmitirá un fallo de "Batería baja" a los receptores de Alert-it conectados al dispositivo. En los modelos con cable, se activará la señal al sistema de enfermería.

La luz de "**Alarma**" comenzará a parpadear cada 6 segundos.

*Nota: El fallo de batería baja se puede suspender durante 12 horas manteniendo presionado el botón "**Armar / Desarmar**" durante 2 segundos. Esto eliminará temporalmente el fallo del receptor durante 12 horas.*

### Batería muy baja

Cuando el dispositivo detecta que la batería está muy baja, **se generará un fallo de "Batería vacía"** en el receptor.

En los modelos con cable, se activará la señal al sistema de enfermería.

*Nota: El fallo "Batería vacía" no se puede suspender.*

## **7      INSERCIÓN DE BATERÍAS Y VIDA ÚTIL DE LAS BATERÍAS**

El dispositivo funciona con 2 pilas alcalinas AA de 1,5 V (LR06).

**Instala quitar las pilas de la siguiente manera:**

1. (Si está montado en la pared) Separe el dispositivo de la pared desenganchando el dispositivo del soporte trasero presionando el clip en la parte inferior del dispositivo y deslizando el dispositivo hacia arriba.
2. (Si no está montado en la pared) Retire la tapa trasera de la batería levantando la lengüeta en la parte inferior de la carcasa trasera y deslizándola hacia abajo y hacia afuera.
3. Retire y deseche las baterías según lo recomendado por las autoridades locales.
4. Inserte las pilas nuevas.
5. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

La duración de la batería variará entre 1 y 2 años, dependiendo de la frecuencia de las alarmas y de la rapidez con la que se respondan a las mismas.

## 8 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

Hay algunas configuraciones adicionales que se pueden cambiar usando el programa para PC "Alert-iT Profile editor".

### RadioAddress

Si se utilizan varios dispositivos en la misma ubicación, cada dispositivo debe utilizar una dirección de radio o "Address" única que puede ir entre 001 y 126. El dispositivo se suministra con una dirección aleatoria que está impresa en la etiqueta del dispositivo. Recomendamos ajustar esto solo si se produce una duplicación de señales entre 2 dispositivos con la misma dirección de radio en el sitio.

### Alarma/Luces de estado

Estas luces se pueden desactivar individualmente si causan molestias al paciente.

### Alarma/Reinicio/Sonidos de pitido

Estos sonidos que produce el dispositivo se pueden desactivar si están causando molestias al paciente.

### Luz de indicador de estado

Cuando el dispositivo está armado, la luz verde de estado parpadeará cada 6 segundos para indicar que está armado.

Esta luz indicadora se puede desactivar si está causando molestias al paciente.

### Fallo Monitor Off

Cuando el dispositivo se apaga manualmente o si el dispositivo se apaga debido a una batería baja, **se enviará un fallo de "MonitorOff"** al receptor de Alert-it. Esta notificación de error se puede desactivar si no es necesario. [Predeterminado: activado]

### Función AlarmTimeout & Fallo AlarmTimeout

Si una alarma de llamada se deja activa en el dispositivo y no se resetea después de 30 minutos, la alarma en el dispositivo se desactivará para ahorrar energía. Esta duración se puede ajustar o establecer en cero para deshabilitarla por completo.

Además, al agotar el tiempo de espera, **se enviará un fallo "AlarmTimeout"** al receptor. Esta notificación de error también se puede desactivar si no es necesario.

### Función AlarmLatching & ClearDelay

De serie, cuando se activa una alarma de llamada, es necesario que el usuario atienda al dispositivo para restablecer la alarma cumpliendo con el deber de atención.

Sin embargo, el detector de presencia se puede configurar de tal modo que cada vez que se detecta un movimiento y se genera una alarma, dicha alarma se borre automáticamente algún tiempo después.

## 9 LIMPIEZA

Puede limpiar la unidad de control, los sensores y los cables con un paño húmedo, un producto de limpieza neutro o un desinfectante suave

## 10 RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

iTs Designs Ltd. (T/A: Alert-iT Care Alarms) es responsable de garantizar la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento del dispositivo, siempre que:

- El dispositivo se instala, utiliza y limpia de acuerdo con las instrucciones de estas instrucciones de uso.
- Cualquier cambio en el dispositivo, el mantenimiento y las reparaciones son realizados por una persona capacitada por Alert-iT o sus representantes.
- Todas las piezas de repuesto o accesorios utilizados han sido aprobados por Alert-iT.

## 11 ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO DESPUÉS DE SU USO

De acuerdo con la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Directiva RAEE), el dispositivo debe recogerse por separado y devolverse a un centro de recogida autorizado. El propietario debe llevar el dispositivo al punto de recogida de residuos especificado por las autoridades locales.



■ Para obtener más información sobre cómo desechar el dispositivo, póngase en contacto con las autoridades pertinentes.

## 12 DECLARACIONES DE CONFORMIDAD

El fabricante, iTs Designs Ltd., declara por la presente que este producto cumple con el Reglamento de Equipos de Radio (UK) de 2017 y la Directiva de Equipos de Radio (2014/53/UE).

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet;

[www.alert-it.co.uk/support/](http://www.alert-it.co.uk/support/)

## 13 CONTROLES RUTINARIOS

### 13.1 Comprobaciones semanales

#### Activación de alarmas

Asegúrese de que los cuidadores reciban las notificaciones de alarma. Active manualmente una alarma si es necesario.

## 14 DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DE ALERT-IT

En el improbable caso de que su producto necesite un servicio de garantía, póngase en contacto con su proveedor, distribuidor o fabricante. Para evitar cualquier inconveniente innecesario por su parte, le recomendamos que lea atentamente estas instrucciones de uso antes de solicitar el servicio de garantía.

### GARANTÍA

Con esta Garantía, Alert-iT garantiza que el producto está libre de defectos de materiales y mano de obra en la fecha de compra original durante un período de tres (3) años a partir de esa fecha.

Si dentro del período de garantía se determina que el producto es defectuoso (en la fecha de compra original) debido a materiales o mano de obra inadecuados, Alert-iT, sin cargo por mano de obra o piezas, reparará o (a discreción de Alert-iT) reemplazará el producto o sus piezas defectuosas sujeto a los términos y limitaciones a continuación. Alert-iT puede reemplazar productos o piezas defectuosas con productos o piezas nuevas o reacondicionadas. Todos los productos retenidos y las piezas reemplazadas pasan a ser propiedad de Alert-iT.

### TÉRMINOS

Los servicios de garantía se proporcionarán solo si la factura original o el recibo de venta (que indica la fecha de compra, el nombre del modelo y el nombre del distribuidor) se presenta con el producto defectuoso dentro del período de garantía. Alert-iT puede denegar el servicio de garantía gratuito si estos documentos no se presentan o si están incompletos o son ilegibles.

Esta garantía no se aplicará si el nombre del modelo o el número de serie del producto se han alterado, eliminado, eliminado o se han hecho ilegibles.

Esta Garantía no cubre los costos de transporte y los riesgos asociados con el transporte de su producto hacia y desde Alert-iT.

Esta Garantía no cubre:

- a. Sensores de ocupación o sensores de humedad (consulte los productos individuales para conocer sus garantías).
- b. Mantenimiento y reparación periódica o sustitución de piezas por desgaste.
- c. consumibles (componentes que se espera que requieran un reemplazo periódico durante la vida útil de un producto, como las baterías).
- d. Daños o defectos causados por el uso, operación o tratamiento del producto de manera inconsistente con el uso normal, por ejemplo, daños o cambios en el producto como resultado de:
  - i. Uso indebido, incluidos:
    - tratamiento que provoque daños físicos, cosméticos o superficiales o cambios en el producto.
    - no instalar o utilizar el producto para su propósito normal o de acuerdo con las instrucciones de instalación o uso de Alert-iT.
    - falta de mantenimiento del producto de acuerdo con las instrucciones de Alert-iT sobre el mantenimiento adecuado.
    - Instalación o uso del producto de una manera inconsistente con las leyes o normas técnicas o de seguridad en el país donde se instala o utiliza.
  - ii. La condición o defectos en los sistemas con los que se utiliza o incorpora el producto, excepto otros productos de Alert-iT diseñados para ser utilizados con el producto.
  - iii. Uso del producto con accesorios, equipos periféricos y otros productos de un tipo, condición y norma distinta a la prescrita por Alert-iT.

- iv. Reparación o intento de reparación por parte de personas no autorizadas por Alert-iT.
- v. Ajustes o adaptaciones sin el consentimiento previo por escrito de Alert-iT, incluidos:
  - Actualización del producto más allá de las especificaciones o características descritas en las instrucciones de uso, o modificaciones al producto para ajustarlo a las normas técnicas o de seguridad nacionales o locales en países distintos de aquellos para los que el producto fue diseñado y fabricado específicamente.
- vi. Uso negligente
- vii. Accidentes, incendios, líquidos, productos químicos, otras sustancias, inundaciones, vibraciones, calor excesivo, exceso o voltaje incorrecto de suministro o entrada, radiación, descargas electrostáticas, incluida la iluminación, otras fuerzas externas e impactos.

Esta garantía cubre solo los componentes de hardware del producto.

## **EXCLUSIONES Y LIMITACIONES**

A excepción de lo indicado anteriormente, Alert-iT no ofrece ninguna garantía (expresa, implícita, legal o de otro tipo) con respecto a la calidad, el rendimiento, la precisión, la confiabilidad, la idoneidad para un propósito particular o de otro tipo del producto o el software que lo acompaña. Si esta exclusión no está permitida o totalmente permitida por la ley aplicable, Alert-iT excluye o limita sus garantías solo en la medida máxima permitida por la ley aplicable. Cualquier garantía que no pueda excluirse por completo se limitará (en la medida en que lo permita la ley aplicable) a la duración de esta Garantía.

La única obligación de Alert-iT en virtud de esta Garantía es reparar o reemplazar los productos sujetos a estos términos y condiciones de la Garantía. Alert-iT no es responsable de ninguna pérdida o daño relacionado con los productos, el servicio, esta Garantía o de otro modo, incluidas: pérdidas económicas o intangibles, el precio pagado por el producto, la pérdida de beneficios, ingresos, datos, disfrute o uso del producto o cualquier producto asociado, pérdidas o daños indirectos, incidentales o consecuentes. Esto se aplica ya sea que la pérdida o el daño se relacione con: deterioro o falta de funcionamiento del producto o productos asociados debido a defectos o falta de disponibilidad mientras se usa Alert-iT, lo que causó tiempo de inactividad, pérdida de tiempo del usuario o interrupción del negocio, inexactitud de la salida del producto o productos asociados.

Esto se aplica a las pérdidas y daños bajo cualquier teoría legal, incluida la negligencia y otros agravios, el incumplimiento de contrato, la garantía expresa o implícita y la responsabilidad estricta (incluso cuando Alert-iT haya sido advertido de la posibilidad de tales daños).

Cuando la ley aplicable prohíba o limite estas exclusiones de responsabilidad, Alert-iT excluye o limita su responsabilidad solo en la medida máxima permitida por la ley aplicable. Por ejemplo, algunos países prohíben la exclusión o limitación de daños resultantes de negligencia, negligencia grave, mala conducta intencional, engaño y actos similares. La responsabilidad de Alert-iT en virtud de esta garantía no excederá en ningún caso el precio pagado por el producto, pero si la ley aplicable solo permite limitaciones de responsabilidad más altas, se aplicarán las limitaciones más altas.

## **DERECHOS LEGALES DEL CONSUMIDOR**

Los consumidores tienen derechos legales (estatutarios) en virtud de las leyes nacionales aplicables relacionadas con la venta de productos de consumo. Esta garantía no afecta a los derechos legales que pueda tener, ni a los derechos que no se pueden excluir o limitar, ni a los derechos frente a la persona a la que compró el producto. Usted puede hacer valer cualquier derecho que tenga a su entera discreción.

## 15 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PIR

<b>Modelo:</b>	P210
<b>Potencia:</b>	Solo batería. 2 pilas alcalinas AA de 1,5 V (LR06).
<b>Luces de señal:</b>	Luz roja de "Alarma". Luz verde de "Estado".
<b>Medidas:</b>	86 x 86 x 19 mm (alto x ancho x fondo).
<b>Peso:</b>	80 gramos.
<b>Color:</b>	Blanco.
<b>IP:</b>	IP21.
<b>Alcance señal PIR:</b>	Hasta 4 metros. 105 grados horizontales a 45 grados verticales.
<b>Vida útil estimada:</b>	5 años.
<b>Radiofrecuencia:</b>	434,0750 MHz (P210A).
<b>Potencia salida:</b>	< 10 mW.
<b>Alcance señal radiofrecuencia:</b>	600 metros (línea de visión).
<b>Radiofrecuencia:</b>	869,2125 MHz (P210C).
<b>Potencia salida:</b>	< 10 mW.
<b>Alcance señal radiofrecuencia:</b>	600 metros (línea de visión).

### Mando a distancia

<b>Modelo:</b>	P211
<b>Potencia:</b>	Solo batería. 3 pilas alcalinas LR44 de 1,5 V.
<b>Alcance:</b>	4 metros. Campo de visión de 90 grados.

### Condiciones ambientales

<b>Temperatura de funcionamiento:</b>	De 5 °C a 35 °C (usar en interiores).
<b>Temperatura de almacenamiento:</b>	De -30 °C a 50 °C.
<b>Límite de humedad:</b>	5% a 90% máx. Sin condensación.

## 16 BÚSQUEDA DE ALARMAS Y CÓDIGOS DE FALLO

Cuando se activa una alarma, el Receptor mostrará lo siguiente.

### 16.1 Alarmas

#### Alarma Mensaje en el receptor Alert-iT P137

Alarma de movimiento	Ayuda 07
----------------------	----------

#### Fallo Mensaje en el receptor Alert-iT P137

Batería baja	Fallo 16
Batería vacía	BATTEND
Tiempo de espera de alarma	Fallo 22
Monitor apagado	Fallo 29

**NOTA:** Si hay más de una alarma o fallo activo, solo se muestra la alarma de prioridad más alta.



ITs Designs Ltd,  
T/A: Alert-iT Care Alarm  
Fernie House (Unit 3)  
Coalville Business Park  
Jackson Street  
Leicester, UK LE67 3NR

[www.alert-it.co.uk](http://www.alert-it.co.uk)

UGARI



Ugari Geriátrica S.L.U.  
Venta de la Estrella 6, Pab. 126  
01006 Vitoria-Gasteiz  
Álava-Araba  
España

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)

