

 **SOULLEVATI**

ELEVADOR INODORO ELECTRICO



UGARI
GERIÁTRICA

SOLLiEVATI es un elevador de inodoros diseñado para personas mayores y para cualquier persona que sufra movilidad limitada debido a enfermedades o lesiones. Puede ayudar a eliminar parte del estrés y la tensión en las articulaciones cuando el usuario pasa de estar sentado a estar de pie.

El usuario, de pie en posición erguida y simplemente apoyado en el asiento del inodoro, desciende suavemente y luego se eleva, sin esfuerzo, con seguridad, de forma independiente, manteniendo siempre los pies en el suelo.

SOLLiEVATI realmente puede ayudar a estas personas a conservar su autonomía en el baño de forma segura y cómoda.

Reduce o incluso elimina la necesidad ser asistido por personal auxiliar.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

+ AJUSTABLE: El asiento se puede detener en cualquier posición que desee entre la altura mínima y máxima permitida. Los brazos (suministrados de serie) se pueden reclinar hacia atrás para que el usuario tenga más libertad de movimiento.

+ ANATÓMICO: SOLLiEVATI se mueve hacia arriba y hacia abajo de manera suave y lenta reproduciendo el movimiento natural de nuestro cuerpo.

+ SIN RUIDO: Gracias a dos actuadores de elevación silenciosos, rodamientos autolubricantes y la carcasa, el elevador SOLLiEVATI es muy silencioso mientras está en movimiento.



+ LIMPIEZA: Se ha prestado especial atención al diseño de SOLLiEVATI. No solo es elegante, sino que también es muy fácil de limpiar, gracias a sus superficies lisas y blancas. Además, la carcasa está pintada con pintura especial resistente a los arañazos y a las altas temperaturas.

+ FACIL: Sin necesidad de albañilería, se instala en tan solo 1 hora. Se adapta a casi cualquier tipo de inodoro.

+ COMPLETO: Los brazos (están incluidos) tienen una forma ergonómica para garantizar la máxima comodidad y confianza al usuario.

+ FÁCIL DE USAR: Los controles SUBIR-BAJAR consisten en dos pulsadores que se pueden accionar fácilmente mientras se sujeta en el apoyabrazos. Los botones de control SUBIR-BAJAR pueden estar en el apoyabrazos derecho o izquierdo, según la solicitud del usuario.

+ SEGURIDAD: En el apoyabrazos que tiene los controles SUBIR-BAJAR también se puede encontrar el botón de encendido y apagado. Además, este botón es de fácil accionamiento para garantizar la máxima seguridad.



SOLLiEVATI ha sido diseñado y fabricado por una empresa que se dedica desde hace 40 años a la producción de dispositivos electromédicos. Es una patente, creación y producción italiana. SOLLiEVATI tiene el marcado CE de Dispositivos Médicos, según la última normativa MDR 2017/745.

EL ELEVADOR DE INODORO SOLLiEVATI ESTÁ DISPONIBLE EN DOS VERSIONES:



SILVER: CON BATERÍAS

Funciona por medio de una batería de litio que garantiza desde 50 hasta 80 ciclos según el peso del usuario); tarda unas 3.5 horas en recargar la batería. Se suministra con dos baterías lo que permite un funcionamiento continuo. El reemplazo de la batería es muy fácil y rápido (ver imagen a la izquierda); esta operación solo toma unos segundos.

GOLD: CON CABLE

Se alimenta directamente a 230 v. Este modelo es adecuado para los usuarios que no quieren preocuparse por la carga de la batería.

N.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	BA SLVT SILVER	Elevador SOLLiEVATI WC eléctrico con batería
2	BA SLVT GOLD	Elevador SOLLiEVATI WC eléctrico

Opciones para el elevador SOLLiEVATI WC



Kit de extensiones

Kit de extensiones, para aumentar la altura del elevador hasta 8 cm. También permiten el uso en inodoros adaptados (con altura aumentada).




Cubierta

Tapa para inodoro.

N.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
3	BA SLVTKITP	Kit de extensiones para SOLLiEVATI - 4 uds
4	BA SLVTCOP	Tapa inodoro para SOLLiEVATI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

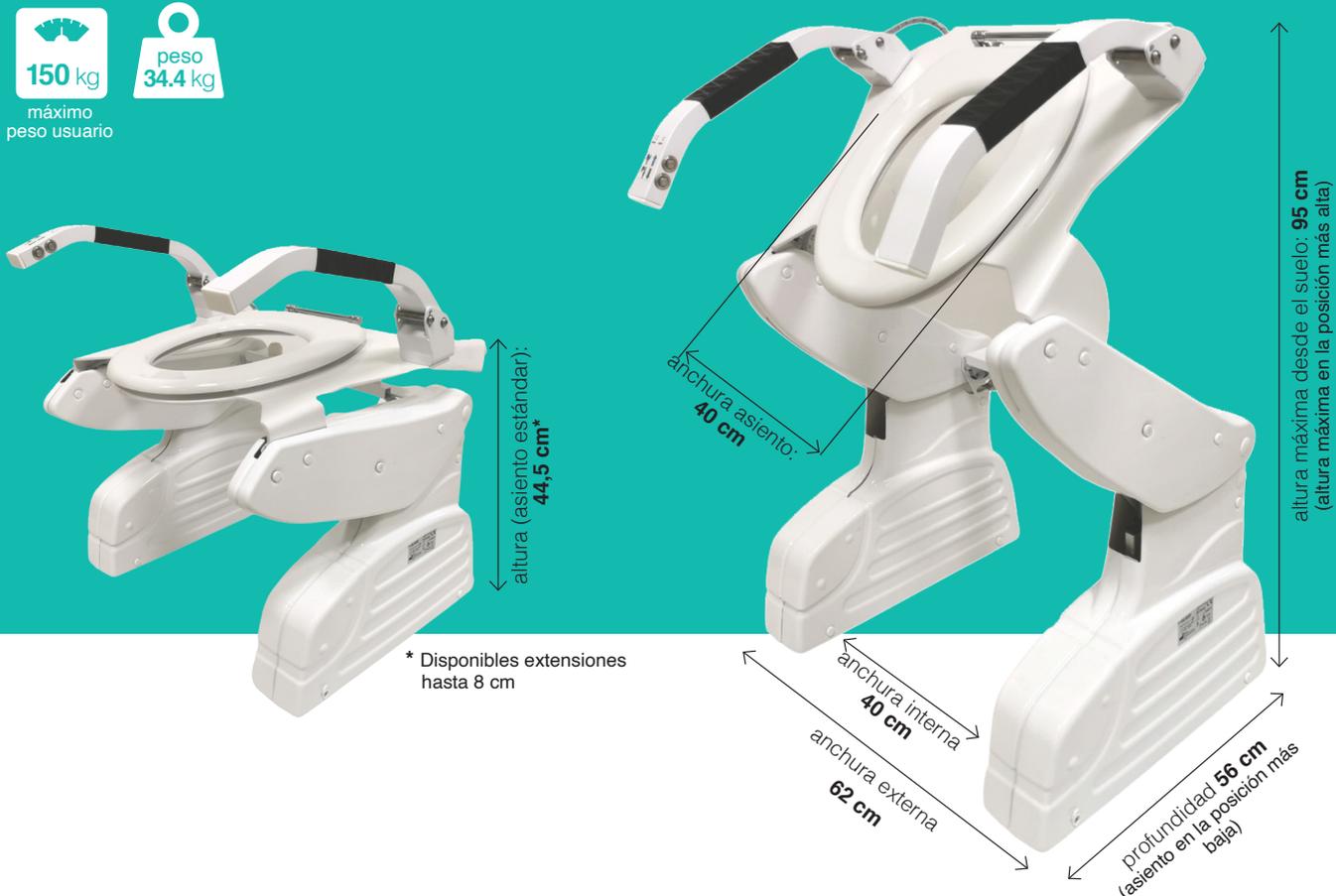

INFORMACIÓN

- **¿Qué pasa si se agota la batería?**

Sollievati tiene dos baterías, así que mientras una funciona, la otra se puede recargar.

- **¿Cómo sé cuando la batería se está agotando?**

Cuando la batería tiene un 20 % de carga restante, el LED del reposabrazos comienza a parpadear.

- **¿Que mantenimiento requiere el Sollievati?**

Sollievati está diseñado para que se pueda limpiar fácilmente y debe limpiarse como cualquier otro artículo sanitario del baño. No utilice productos agresivos, abrasivos ni disolventes como lejía y ácido clorhídrico para limpiar el Sollievati. No utilice alcohol para limpiar el asiento. Limpie y desinfecte solo frotando y no rociando con spray. Limpie las superficies con un paño suave. La frecuencia de limpieza depende del uso.

- **¿Qué alturas deben tener los WC para el uso de SOLLIEVATI?**

La altura del inodoro debe estar entre 38 y 44,5 cm. Si el inodoro tiene una altura superior a 44,5 cm, es posible utilizar el Sollievati utilizando las extensiones (opcional) para incrementar la altura del sistema.

- **¿Cuánto tarda en cargar las baterías? ¿Cuántos levantamientos puedes hacer con una batería cargada??**

Aproximadamente 3,5 horas utilizando el cargador incluido. Unas 30-50 elevaciones.

- **¿Cómo sé si cabe en mi WC??**

Mirar las ilustraciones donde aparecen las características técnicas necesarias para posicionar Sollievati.

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

www.ugari.es