

Especificaciones técnicas



Índice:

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	HOMOLOGACIÓN DIRECTIVAS CE.....	3
3.	DEFINICIÓN DEL PRODUCTO.....	3
4.	MONTAJE.....	3
5.	GUÍA DE USUARIO.....	3
6.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESAS VISION	4
7.	TEST DE FUNCIONAMIENTO	5
8.	NORMAS DE SEGURIDAD.....	5
9.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	6
	9.1 Estructura.....	6
	9.2 Encimera, superficie laminada.....	6
	9.3 Mantenimiento.....	6
10.	AVERÍAS MÁS COMUNES	6
	10.1 La mesa parece inestable.....	6
	10.2 La mesa no se puede ajustar en altura o la encimera se inclina con dificultad.....	6
11.	MARCADO CE.....	7
12.	GARANTÍA.....	8

21-06-2007

1. Introducción

VISION es la nueva gama de modernas mesas ajustables en altura. Independientemente de quien va a ser el usuario, para nosotros un producto debe ser funcional y bonito, por eso decidimos llamarle VISION.

Las mesas Vision cubren todas las necesidades ergonómicas de trabajo de personas con o sin discapacidad.

Las mesas Vision están disponibles en diferentes medidas para cubrir las necesidades individuales o de grupo. El espacio para las piernas bajo la encimera hace que las mesas sean óptimas para usuarios en silla de ruedas y proporciona unas condiciones de trabajo óptimas para terapias de rehabilitación. Debido a su diseño único con esquinas redondeadas no existe peligro de golpearse con esquinas afiladas, y dos ruedas incorporadas en la parte trasera facilitan el desplazamiento de la mesa para que se pueda acercar al usuario con facilidad. Como opción se pueden colocar brazos de soporte desmontables si es necesario.

Para poder realizar actividades específicas y cubrir las necesidades individuales, las mesas se ajustan rápida y fácilmente en alturas de 50 a 70 cm o 60 a 90 cm por medio de una manivela desmontable.

Todas las mesas están disponibles en seis colores: blanco, gris claro, gris oscuro, rojo, azul y verde que pueden combinar con las cubiertas de patas en rojo, azul y verde. Se utilizará color aluminio para las patas para los demás colores de encimera.



Este manual debe acompañar SIEMPRE al producto, debe estar disponible para el usuario y ser leído por este. La instalación, la utilización y las revisiones adecuadas son factores decisivos para garantizar un funcionamiento correcto y seguro.



Si este producto es ajustable eléctricamente en altura, existe el riesgo de accidentes. El producto además debe ser SIEMPRE manejado por o bajo la supervisión de un adulto que haya comprendido la importancia de la sección nº 8 "Normas de seguridad".

Es muy importante que no haya obstáculos entre la encimera fija y la estructura para evitar accidentes.

2. Homologación Directivas CE

Este producto dispone del marcado CE que garantiza el cumplimiento de todas las normas eléctricas y aplica los requerimientos básicos de seguridad. Ver apartado de la declaración CE al respecto en la sección 11.

3. Definición del producto

Las mesas Vision están diseñadas para proporcionar un ajuste en altura, que permita obtener una postura ergonómica tanto para usuarios, como para ayudantes. NO utilice las mesas Vision para elevar personas ni cargas. Este producto debe ser usado en interiores, en condiciones normales y temperatura y humedad.

4. Montaje

Ver manual de instrucciones de montaje.

5. Guía de usuario

Ver manual de uso.

6. Especificaciones técnicas mesas Vision

Producto:	Vision Tipo A, B, C, D, E, F, G 90x60 cm, 120x60 cm, 90x90 cm, 165x100 cm, 200x100 cm, 240x100 cm
Referencia:	20-6XXXX
Ajuste en altura:	50–70 cm con encimera (manual o eléctrica) 60–90 cm con encimera (manual o eléctrica)
Material:	Aleación de aluminio. 606045-T6 Acero St. 37 Diversos componentes de plástico
Tratamiento superficial:	Epoxi, varios colores Cromado
Encimera:	Laminado Etronit-M
Carga máxima mesa	100 kg distribuidos por toda la encimera
Carga máxima durante elevación:	50 kg
Carga máxima con encimera inclinada	30 kg
Carga maxima durante Inclinación encimera	4 kg
Garantía:	Ver garantía, sección 12
Fabricante:	Ropox A/S, Dinamarca

7. Test de funcionamiento

Una vez realizada la instalación, deberán comprobarse todas las funciones de las mesas. Este test deberá ser realizado por profesionales. Posteriormente deberá ser revisado aplicando este test como mínimo una vez al año:

Accionamiento manual

1. Comprobar que se han seguido las instrucciones de montaje.
2. Comprobar que todos los tornillos están bien apretados.
3. No debe haber ninguna carga sobre la estructura.
4. No debe haber nada que impida que el sistema se mueva libremente dentro del rango de ajuste en altura.
5. Gire la manivela, mueva el marco hasta la posición más baja y compruebe que el movimiento es suave y regular.
6. Ahora gire la manivela y desplaza la mesa hasta la posición más alta y compruebe que de nuevo que el movimiento es suave y regular.

Si la encimera es abatible:

7. Colocar la manivela en el eje de inclinación de acuerdo con el manual de uso y elevar la encimera hasta la posición más inclinada y bajarla. Comprobar que el movimiento es suave y regular.

Una vez realizado este test satisfactoriamente, el sistema está listo para su uso. Ver sección nº 8 Normas de seguridad.

Accionamiento eléctrico

1. Comprobar que se han seguido las instrucciones de montaje.
2. Comprobar que todos los tornillos están bien apretados.
3. No debe haber ninguna carga sobre la estructura.
4. No debe haber nada que impida que el sistema se mueva libremente dentro del rango de ajuste en altura.
5. Pulse el interruptor de control hasta la posición más alta y compruebe que el movimiento es suave y regular.
6. Ahora pulse el interruptor para bajar la mesa y compruebe que el movimiento es suave regular.

Si la encimera es abatible:

7. Pulsar el interruptor de inclinación e inclinar la encimera hasta la posición más alta. Comprobar que el movimiento es suave y regular. Pulsar el interruptor para bajar la encimera y presionar el rail de seguridad. La encimera se detendrá.

8. Normas de seguridad

- La mesa debería ser usada exclusivamente por personas que hayan leído y entendido estas instrucciones.
- No utilice la mesa para elevar personas ni cargas.
- Siempre que use la mesa evite riesgos con las personas u objetos cercanos. La persona que manipule el sistema es la responsable de evitar daños y lesiones.
- En caso de que la mesa se emplee en un lugar accesible para niños, el usuario deberá tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de situación peligrosa.
- Cerciorarse de que hay espacio suficiente encima y debajo de la mesa durante el ajuste en altura de la misma.
- No utilice la mesa en caso de error o avería.
- No sobrecargar la mesa y asegurarse de que la carga está bien distribuida sobre la superficie.
- En caso de reparaciones o inspecciones asegurarse de que la mesa no tiene carga.
- Está prohibida cualquier modificación que pueda influenciar en su correcto funcionamiento y montaje.
- La garantía carecerá de validez si la instalación del sistema no se hace siguiendo estas instrucciones.

- Utilice solo piezas de repuesto Ropox. Si se utilizan otro tipo de piezas para las reparaciones la garantía puede ser retirada.

9. Limpieza y mantenimiento

9.1 Estructura

Para la limpieza, humedezca un trapo con agua tibia y emplee productos de limpieza domésticos. No utilice detergentes, abrasivos, cepillos o esponjas. Seque el sistema después de limpiarlo.

9.2 Encimera, superficie laminada

Limpie la superficie de la encimera con un paño suave previamente sumergido en agua caliente y bien escurrido con un poco de detergente. El detergente no debe tener jabón sulfónico ya que puede dejar la superficie grasienta. Las manchas no se pueden quitar con agua, normalmente se suelen quitar con una mezcla a partes iguales de lejía y agua o acetona. Cuando use estos productos comprobar que la habitación está suficientemente ventilada y que no entren en contacto con la estructura.

Las manchas de rotuladores se pueden limpiar usando alcohol metílico y los dibujos en lápiz se pueden quitar con una goma. En caso de duda, se recomiendan utilizar los quitamanchas en lugares que no se vea.

Algunos productos químicos, como tintas o colorantes de zumos de frutas pueden causar decoloración si se dejan por un periodo largo de tiempo.

No use estropajos de aluminio, o limpiadores u otros productos abrasivos o detergentes que dejen una película en la superficie, como por ejemplo jabón chimbo.

Después de limpiar, lavar la mesa con un paño suave previamente sumergido en agua y bien escurrido y secar con un paño.

9.3 Mantenimiento

Las Inspecciones, reparaciones y mantenimiento deberán llevarse a cabo por profesionales.

La mesa no necesita mantenimiento y las partes móviles no necesitan lubricarse. Por razones de seguridad se recomienda realizar una inspección anual:

- Comprobar que todos los tornillos han sido bien apretados.
- Comprobar que la mesa se mueve libremente y sin dificultad desde la posición más baja hasta la más alta.

Utilice solo piezas de repuesto Ropox. Si se utilizan otro tipo de piezas para las reparaciones la garantía puede ser retirada.

10. Averías más comunes

10.1 La mesa parece inestable

- Los tornillos de montaje de la estructura no han sido bien apretados.
- Apretar todos los tornillos de la estructura. Ver instrucciones de montaje.

10.2 La mesa no se puede ajustar en altura o la encimera se inclina con dificultad

- Comprobar que no hay carga en la mesa
- Comprobar que la mesa no está sobrecargada

11. Marcado CE

Vision, mesa ajustable en altura

Encimera 90x60 cm

<u>Mod:</u>	<u>Altura 50-70 cm</u>	<u>Altura 60-90 cm</u>
A	20-60010	20-60020
B	20-60011	20-60021
C	20-60012	20-60022
D	20-60013	20-60023
E	20-60014	20-60024
F		
G		

Encimera 120x60 cm

<u>Altura 50-70 cm</u>	<u>Altura 60-90 cm</u>
20-60210	20-60220
20-60211	20-60221
20-60212	20-60222
20-60213	20-60223
20-60214	20-60224
20-60215	20-60225
20-60216	20-60226

Encimera 90x90 cm

<u>Mod:</u>	<u>Altura 50-70 cm</u>	<u>Altura 60-90 cm</u>
A	20-60310	20-60320

Encimera 165x100 cm

<u>Altura 50-70 cm</u>	<u>Altura 60-90 cm</u>
20-62116	20-62216

Encimera 200x100 cm

<u>Mod:</u>	<u>Altura 50-70 cm</u>	<u>Altura 60-90 cm</u>
A	20-62120	20-62220

Encimera 240x100 cm

<u>Altura 50-70 cm</u>	<u>Altura 60-90 cm</u>
20-62124	20-62224

Conforme a las siguientes directivas y estandars:

DIRECTIVAS

Directiva-EU 93/42EEC de equipamiento médico, modificada por directiva Nº. 98/79/EC

ESTANDARES

DS/EN	1041:	2000	DS/EN	12182:	2002
DS/EN	14971:	2001	DS/EN ISO	9999:	2002

Las declaraciones de conformidad pueden ser suministradas previa solicitud.

12. Garantía

Los sistemas metálicos ROPOX tienen una garantía de 5 años. Todas las partes móviles tienen una garantía de 2 años, siempre que los productos se utilicen de forma correcta y no se sobrecarguen.

En caso de aparecer piezas defectuosas bien por error de fabricación o por defecto de los materiales empleados y éstos se encuentren cubiertos por la garantía, será ROPOX quien proporcione las piezas de repuesto, sin embargo, no cubrirá costes de transporte ni de instalación.

Cualquier disputa que pueda surgir entre las partes deberá dirimirse por las leyes danesas y en los tribunales de este país.

Para que la garantía sea efectiva, las inspecciones y servicio de mantenimiento deberán llevarse a cabo de acuerdo a las instrucciones de mantenimiento y verificarla a través de las hojas de servicio. La garantía no cubre los gastos normales de mantenimiento, instalación o diferentes ajustes como los que se describen en este manual.

En caso de daños originados por una instalación o empleo defectuosos, la garantía podrá ser anulada.

Los trabajos bajo garantía no deberán comenzar sin previo acuerdo con ROPOX A/S con respecto al alcance y desarrollo de dicho trabajo. ROPOX A/S no asume los costes de garantía, a no ser que exista un acuerdo previo anterior al comienzo del desarrollo del trabajo.

Se deberá notificar previamente la devolución de piezas consideradas cubiertas por la garantía de ROPOX, después de esta notificación usted recibirá un número para su formulario de queja que deberá incluir junto con las piezas que se devuelven.

En caso de queja, por favor indique siempre:

Nombre del producto:

Tipo:

Número de serie y año de construcción:

Nº de Factura y fecha:

Descripción detallada del funcionamiento así como la naturaleza de la queja:

