




Loire recto 135, 40-40120-9

Instrucciones de montaje


DS 3028

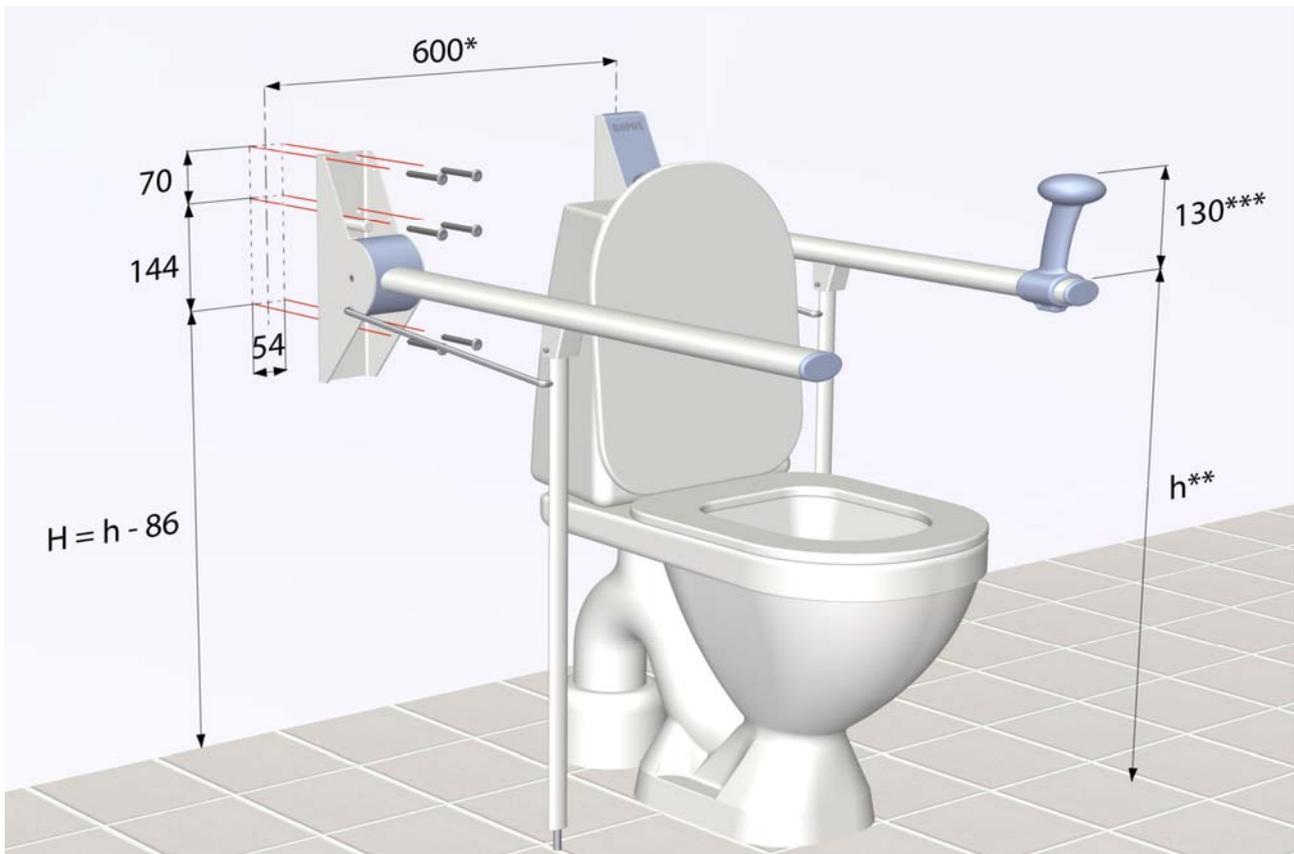

Todas las medidas son en mm

- * De acuerdo con la norma DS 3028
- ** Si lo van a utilizar varios usuarios se recomienda colocar el apoyabrazos a una altura de $h = 800\text{mm}$
- *** Si se usa el apoyo de mano se recomienda que la parte superior se coloque a una altura de $h = 800\text{mm}$



DIN 18040-1

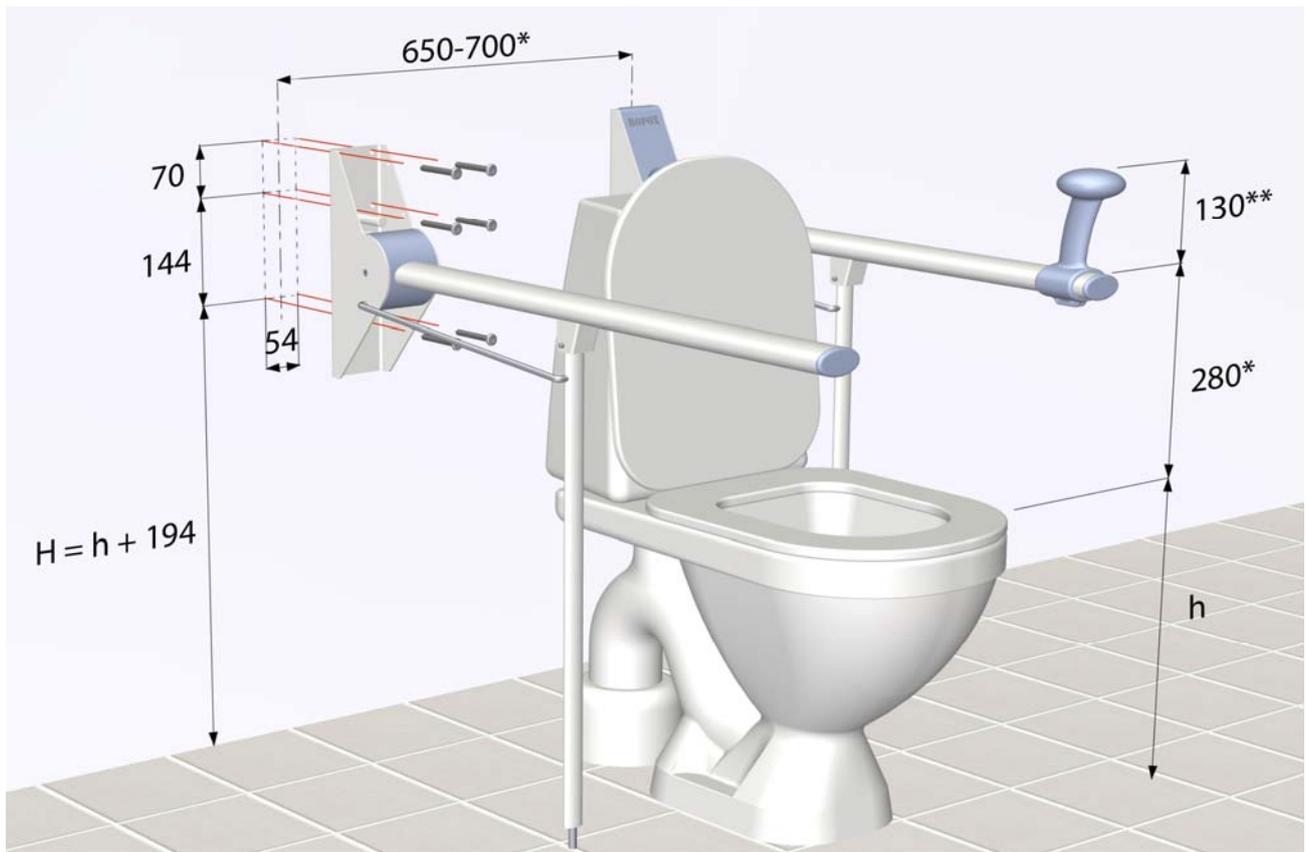


Todas las medidas son en mm

* De acuerdo con la norma DIN 18040-1

** Si se usa el apoyo de mano se recomienda que la parte superior se coloque a una altura de h = 800mm

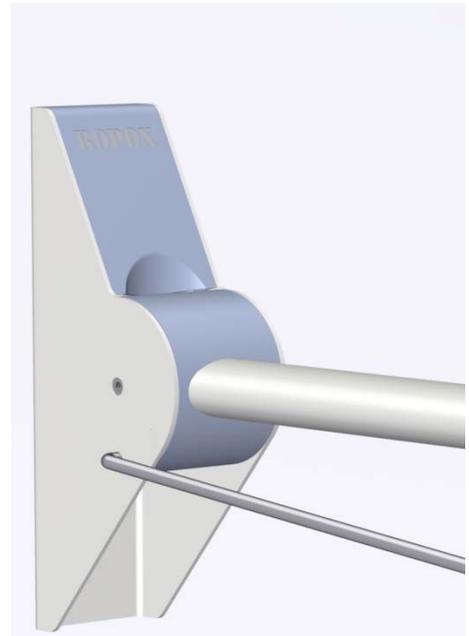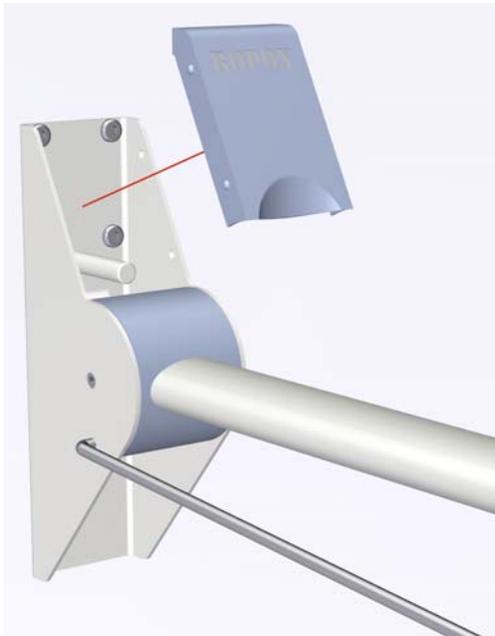

Accesorios		
40-40925	Apoyo de mano	
40-40915	Soporte toallas	
40-40910	Soporte papel higiénico	
40-40905	Soporte para ajuste en altura Loire	

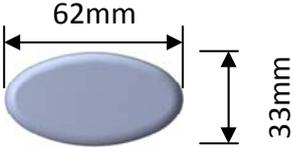Características técnicas				
	Ref nº	Carga máxima Cumple la norma EN12182	Longitud	Espacio, plegado
	40-40120 LOIRE recto 135	135kg	900mm	143mm
	Carga lateral sin deformación			
	Sección del apoyabrazos			
	Material: Brazo: Aluminio con recubrimiento epoxi Soporte pared: Acero, cromado con recubrimiento epoxi			

Mantenimiento

Los apoyabrazos no necesitan mantenimiento. Por razones de seguridad se recomienda comprobar que los tornillos de sujeción y las partes móviles están firmemente apretados y proporcionan seguridad al usuario.

Limpieza

Para limpiar este producto, no se debe utilizar limpiadores de agua a presión. Este producto no puede ser lavado con ninguna máquina.

Simplemente use un paño o esponja húmeda con agua jabonosa (pH 7) y un máximo de 60°C. Limpiar siempre los apoyabrazos después de cada uso para prevenir la suciedad se pegue a la superficie del los apoyabrazos.

Importante:

No utilice detergente en polvo u otros elementos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie. También evite el uso de utensilios de limpieza con bordes afilados. Nunca use ácidos fuertes o alcalinos.